

Alpinion Medical Systems - wykaz zaaprobowanych produktów do dezynfekcji oraz żelu

[Rev.191]

O : Zatwierdzony / X : Niezatwierdzony / A : Nieprzetestowany HLD : Wysoki poziom dezynfekcji / ILD : Średni poziom dezynfekcji / LLD : Niski poziom dezynfekcji

Środek dezynfekujący													
Produkt	Cidex	Cidex OPA	Gigasept AF	Gigasept FF	Virkon	Cidex Plus	Wavicide-01	AIDAL PLUS	Cetylicide-G	Hibitane	Metricide 14	Sporidicin	
Producent	Johnson and Johnson	Johnson and Johnson	Schallce&Mayr UK Ltd.	Schallce&Mayr UK Ltd.	Dupont (Antec)	Johnson and Johnson	Medical Chemical Corp	Whiteley Medical		COOPERS	Metrex	CONTEC	
Poziom dezynfekcji	HLD	HLD		HLD	HLD	HLD	HLD	HLD			HLD	HLD	
Składniki aktywne	Glutaraldehyde	Orthophthalaldehyde	Succinc dialdehyde	Succinc dialdehyde	Potassium	Glutaraldehyde	Glutaraldehyde	Glutaraldehyde	Glutaraldehyde	Chorhexidine gluconate	Glutaraldehyde	Phenol	
Aprobata FDA	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	
Postać produktu	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	
G	CI-6	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	CI-6T	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	CI-6I	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	CI-6CT	A	O	A	X	A	A	O	O	A	A	A	O
	SCI-6	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	C5-8	O	O	O	O	A	O	O	A	A	O	O	A
	SCI-4HS	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	SCI-4H	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	SCI-6H	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L3-8	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L3-8I	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L3-12	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L3-12T	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L3-12I	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L3-12H	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L3-12HWD	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L3-12X	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L8-17	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L8-17I	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	L8-17X	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	MP1-5X	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	SP1-5	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	SP1-5I	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	SP3-8	A	O	A	O	O	O	O	A	A	A	A	X
	SP1-5X	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	P1-5CT	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	VCI-6	A	O	A	O	O	O	A	O	A	A	A	A
	VCI-6T	A	O	A	O	O	O	A	O	A	A	A	A
	SVC1-6	A	O	A	O	O	O	A	O	A	A	A	A
	SVC1-6H	A	O	A	O	O	O	A	O	A	A	A	A
	E3-10	A	O	A	A	O	O	A	A	A	A	A	A
	EN3-10	O	O	A	A	A	O	O	A	A	A	A	A
	EV3-10	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	EV3-10T	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	EC3-10	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	EC3-10T	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	E3-10H	A	O	A	A	O	O	A	A	A	A	A	A
	EC3-10H	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	EV3-10H	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	I03-12	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	CW2.0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	CW5.0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	I08-17	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	EV3-10X	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	EC3-10X	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	VE3-10H	A	O	A	O	O	O	A	O	A	A	A	A
	C5-8N	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	C5-8NT	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	SP1-5T	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	SP3-8T	A	O	A	O	O	O	O	A	A	A	A	X
	I08-17T	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	minisono L3-12	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	minisono CI-6	A	O	A	X	O	O	O	O	A	A	A	X
	TEE3-7	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Akcesoria	US-Guider	A	O	A	X	X	O	O	O	A	A	A	O

UWAGA

- Nie wycierać kabla, odczynnika napięcia ani złącza głowicy środkiem dezynfekującym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie i / lub odbarwienie tych części głowicy.
- Nie zanurzać głowic w roztworze na dłużej niż jedną godzinę, chyba że nadają się do sterylizacji.
- Stosowanie niezalecanego środka dezynfekującego lub niestosowanie się do zalecanej metody dezynfekcji może spowodować uszkodzenie i / lub odbarwienie głowicy oraz unieważnienie gwarancji na głowicę.

Alpinion Medical Systems - wykaz zaaprobowanych produktów do dezynfekcji oraz żelu

[Rev.191]

O : Zatwierdzony / X : Niezatwierdzony / A : Niezręcznie używany HLD : Wysoki poziom dezynfekcji / ILD : Średni poziom dezynfekcji / LLD : Niski poziom dezynfekcji

Środek dezynfekujący												
Produkt	Omnicide – FG2	Nuclean	Ster-Bac Biu	Sani-Cloth HB	PeraSafe	Super Sani-Cloth	Cleanisept wipex	CLEANISEPT ° WIPES forte	Protex	Tristel Duo	SteriMax° Sporicide Wipes	SteriMax° Wipes
Producent	Interhatch	Ecolab	Ecolab	NICE PAK	VWR	NICE PAK	Dr. Schurpache	Dr. Schumacher	PARKER	Tristel solutions	Aseptix	Aseptix
Poziom dezynfekcji	-	-	-	LLD	HLD	-	LLD	LLD	LLD	HLD	-	-
Składniki aktywne	Glutaraldehyde	Glutaraldehyde	Quaternary Ammonium	Quaternary Ammonium	Peracetic	Alcohol	Quaternary Ammonium	Quaternary Ammonium	Quaternary Ammonium	Chlorine Dioxide	Hydrogen peroxide	Hydrogen peroxide
Aprobata FDA	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
Postać produktu	Płyn	Płyn	Płyn	Chusteczki	Płyn	Chusteczki	Chusteczki	Chusteczki	Spray	Spray	Chusteczki	Chusteczki
G	C1-6	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	C1-6T	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	C1-6I	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	C1-6CT	A	A	A	A	A	A	A	O	A	O	O
	SC1-6	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	C5-8	A	A	O	O	O	A	A	A	A	A	A
	SC1-4HS	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	SC1-4H	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	SC1-6H	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L3-8	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L3-8I	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L3-12	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L3-12T	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L3-12I	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L3-12H	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L3-12HWD	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L3-12X	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L8-17	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L8-17I	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	L8-17X	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	MP1-5X	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	SP1-5	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	SP1-5I	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	SP3-8	A	A	A	O	A	O	A	A	A	A	X
	SP1-5X	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	P1-5CT	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	VCI-6	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O	A
	VCI-6T	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O	A
	SVC1-6	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O	A
	SVC1-6H	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O	A
	E3-10	A	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A
	EN3-10	O	O	A	A	A	O	A	A	A	A	A
	EV3-10	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	EV3-10T	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	EC3-10	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	EC3-10T	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	E3-10H	A	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A
	EC3-10H	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	EV3-10H	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	103-12	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	CW2.0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	CW5.0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	108-17	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	EV3-10X	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
	EC3-10X	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X
VE3-10H	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O	A	
C5-8N	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X	
C5-8NT	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X	
SP1-5T	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X	
SP3-8T	A	A	A	O	A	O	A	A	A	A	X	
I08-17T	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X	
minisono L3-12	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X	
minisono C1-6	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	X	
TEE3-7	A	A	A	A	O	A	A	A	A	A	A	
Akcesoria	US-Gulder	A	A	A	A	A	O	O	O	X	X	X

Alpinion Medical Systems - wykaz zaaprobowanych produktów do dezynfekcji oraz żelu

[Rev.191]

O : Zatwierdzony / X : Niezatwierdzony / A : Nieprzetestowany HLD : Wysoki poziom dezynfekcji / ILD : Średni poziom dezynfekcji / LLD : Niski poziom dezynfekcji

		Środek dezynfekujący										
Produkt	SteriMax Sporicide	UltraSan Broa Spectrum	CaviCide	CaviWipes	Metricide OPA Plus	Metricide	Meliseptol Wipes sensitive	Meliseptol Wipes ultra	Revital-OX Resert	Meliseptol Foam pure	Sporox II	Protex wipes
Producent	Aseptix	Aseptix	Metrex	Metrex	Metrex	Metrex	B. Braun	B. Braun	STERIS	B. Braun	Sultan Healthcare	PARKER
Poziom dezynfekcji	-	-	-	LLD, ILD	HLD	HLD	-	-	HLD	-	HLD	
Składniki aktywne	Hydrogen peroxide	Hydrogen peroxide	Isopropanol	Isopropanol	Orthophthalald ehyde	Glutaraldehyde	Propan-1-ol	Quaternary Ammonium	Hydrogen Peroxide	Propan-1-ol	Hydrogen Peroxide	Ammonium chloride
Aprobata FDA	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK
Postać produktu	Spray	Spray	Spray	Chusteczki	Płyn	Płyn	Chusteczki	Chusteczki	Płyn	Płyn	Płyn	Chusteczki
G	C1-6	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	C1-6T	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	C1-6I	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	C1-6CT	A	A	O	O	A	A	A	O	O	X	O
	SC1-6	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	C5-8	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	SC1-4HS	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	SC1-4H	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	SC1-6H	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L3-8	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L3-8i	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L3-12	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L3-12T	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L3-12i	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L3-12H	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L3-12HWD	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L3-12X	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L8-17	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L8-17i	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	L8-17X	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	MP1-5X	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	SP1-5	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	SP1-5i	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	SP3-8	X	X	X	A	A	A	X	A	A	A	A
	SP1-5X	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	P1-5CT	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	VCI-6	A	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O
	VCI-6T	A	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O
	SVC1-6	A	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O
	SVC1-6H	A	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O
	E3-10	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	EN3-10	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	EV3-10	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	EV3-10T	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	EC3-10	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	EC3-10T	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	E3-10H	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	EC3-10H	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	EV3-10H	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	103-12	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	CW2.0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	CW5.0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	108-17	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	EV3-10X	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
	EC3-10X	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O
VE3-10H	A	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O	
C5-8N	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O	
C5-8NT	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O	
SP1-5T	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O	
SP3-8T	X	X	X	A	A	A	X	A	A	A	A	
I08-17T	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O	
minisono L3-12	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O	
minisono C1-6	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	O	
TEE3-7	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Aksesoria	US-Guider	X	X	X	O	O	X	A	A	A	A	A

Alpinion Medical Systems - wykaz zaaprobowanych produktów do dezynfekcji oraz żelu

[Rev.19]

O : Zatwierdzony / X : Niezatwierdzony / A : Nieprzetestowany HLD : Wysoki poziom dezynfekcji / ILD : Średni poziom dezynfekcji / LLD : Niski poziom dezynfekcji

Produkt	Środek dezynfekujący							Środek do czyszczenia wstępnego					
	Sani-cloth AF3	Acrylan	Descogen Liquid	Cutasept F	Cutasept G	Mikrobac Virucidal Tissues	SONO Ultrasound and Disinfecting Wipe	T-spray	T-spray II	Enzol	Theracide Plus (SSN)	Transeptic	
Producent	NICE PACK	ANTISEPTICA	ANTISEPTICA	BODE Chemie GmbH	BODE Chemie GmbH	BODE Chemie GmbH	ADVANCED ULTRASOUND SOLUTIONS INC.	Pharmaceutical Innovations, INC	Pharmaceutical Innovations, INC	Johnson and Johnson	Burnishine Products	PARKER	
Poziom dezynfekcji	LLD, ILD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Składniki aktywne	Quaternary Ammonium	Quaternary ammonium compounds	Potassium peroxymonosulfate	Propan-2-ol	Propan-2-ol	ammonium chloride	ammonium chloride	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	Subtilisins (proteolytic enzymes)	Isopropyl alcohol	Isopropyl alcohol	
Aprobata FDA	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	
Postać produktu	Chusteczki	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Chusteczki	Chusteczki	Spray	Spray	Płyn	Płyn	Płyn	
G Ł O W I C E	C1-6	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	C1-6T	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	C1-6I	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	C1-6CT	O	A	A	X	X	O	O	A	A	A	A	A
	SC1-6	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	CS-8	A	A	A	A	A	A	A	O	O	A	A	A
	SC1-4H5	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	SC1-4H	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	SC1-6H	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L3-8	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L3-8i	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L3-12	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L3-12T	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L3-12I	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L3-12H	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L3-12HWD	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L3-12X	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L8-17	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L8-17I	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	L8-17X	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	MP1-5X	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	SP1-5	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	SP1-5I	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	SP3-8	A	X	A	X	X	A	X	A	A	O	A	A
	SP1-5X	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	P1-5CT	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	VC1-6	O	O	O	O	A	O	O	A	O	O	O	O
	VC1-6T	O	O	O	O	A	O	O	A	O	O	O	O
	SVC1-6	O	O	O	O	A	O	O	A	O	O	O	O
	SVC1-6H	O	O	O	O	A	O	O	A	O	O	O	O
	E3-10	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	O
	EN3-10	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A
	EV3-10	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	EV3-10T	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	EC3-10	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	EC3-10T	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	E3-10H	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A
	EC3-10H	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	EV3-10H	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	103-12	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A
	CW2.0	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	CW5.0	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
108-17	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
EV3-10X	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
EC3-10X	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
VE3-10H	O	O	O	O	A	O	O	A	O	O	O	O	
CS-8N	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
CS-8NT	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
SP1-5T	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
SP3-8T	A	X	A	X	X	A	X	A	A	O	A	A	
108-17T	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
minisono L3-12	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
minisono C1-6	O	X	O	X	X	O	X	A	A	O	A	A	
TEE3-7	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	
Aksesoria	US-Guider	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	O	

Alpinion Medical Systems - wykaz zaaprobowanych produktów do dezynfekcji oraz żelu

[Rev.19]

O : Zatwierdzony / X : Niezatwierdzony / A : Nieprzetestowany HLD : Wysoki poziom dezynfekcji / ILD : Średni poziom dezynfekcji / LLD : Niski poziom dezynfekcji

		Środek do czyszczenia wstępnego						Żel						
Produkt		Metrizyme	Klenzyme	McKesson	Cidezyme	Endozyme	EmPower	Ultrasound probe cleaning wipes	Aquasonic100	ULTRASOUND GEL	Ultrasound Transmission gel	Scan	Sonogel	
Producent		Metrex	STERIS	McKesson	Johnson and Johnson	RUHOF Corporation	Metrex	Nanosonics	PARKER	Ultragel Hungary 200 Ltd	Ecosonic	PARKER	SONOGEL Vetriebs GmbH	
Poziom dezynfekcji		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Składnik aktywny		Propylene glycol	Enzymes	PCMX (Chloroxylenol)	Proteolytic Enzymes	Propanol	Propylene glycol	PHENOXYETHA NOL	-	-	-	-	-	
Aprobata FDA		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
Postać produktu		Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Płyn	Chusteczki	Żel	Żel	Żel	Żel	Żel	
G	C1-6	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	C1-6T	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	C1-6I	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	C1-6CT	O	A	A	A	A	O	A	O	A	A	A	A	
	SC1-6	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	C5-8	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	O	O
	SC1-4H5	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	SC1-4H	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	SC1-6H	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L3-8	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L3-8I	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L3-12	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L3-12T	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L3-12I	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L3-12H	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L3-12HWD	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L3-12X	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L8-17	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L8-17I	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	L8-17X	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	MPI-5X	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	SP1-5	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	SP1-5I	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	SP3-8	O	O	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A	
	SP1-5X	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	P1-5CT	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O	
	VCI-6	O	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A	O	
	VCI-6T	O	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A	O	
	SVC1-6	O	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A	O	
	SVC1-6H	O	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A	O	
	E3-10	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	EN3-10	O	O	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A	
EV3-10	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
EV3-10T	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
EC3-10	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
EC3-10T	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
E3-10H	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A		
EC3-10H	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
EV3-10H	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
103-12	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
CW2.0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CW5.0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
108-17	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
EV3-10X	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
EC3-10X	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
VE3-10H	O	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A	O		
C5-8N	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
C5-8NT	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
SP1-5T	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
SP3-8T	O	O	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A		
108-17T	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
minisono L3-12	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
minisono C1-6	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	A	O		
TEE3-7	A	A	A	O	A	A	A	O	A	A	A	A		
Akcesoria	US-Guider	X	A	A	A	A	O	A	O	A	A	A		

Alpinion Medical Systems - wykaz zaaprobowanych produktów do dezynfekcji oraz żelu

[Rev.19]

O : Zatwierdzony / X : Niezatwierdzony / A : Nieprzetestowany HLD : Wysoki poziom dezynfekcji / ILD : Średni poziom dezynfekcji / LLD : Niski poziom dezynfekcji

		Żel			
Produkt		Super sonic			
Producent		Sung Heung Corporation			
Poziom dezynfekcji		-			
Składnik aktywny		-			
Aprobata FDA		NIE			
Postać produktu		Żel	Urządzenie	Urządzenie	Urządzenie
G	C1-6	O	O	O	O
	C1-6T	O	O	O	O
	C1-6I	O	O	O	O
	C1-6CT	A	A	A	O
	SC1-6	O	O	O	O
	C5-8	A	A	A	A
	SC1-4HS	O	O	O	O
	SC1-4H	O	O	O	O
	SC1-6H	O	O	O	O
	L3-8	O	O	O	O
	L3-8i	O	O	O	O
	L3-12	O	O	O	O
	L3-12T	O	O	O	O
	L3-12I	O	O	O	O
	L3-12H	O	O	O	O
	L3-12HWD	O	O	O	O
	L3-12X	O	O	O	O
	L8-17	O	O	O	O
	L8-17I	O	O	O	O
	L8-17X	O	O	O	O
	MP1-5X	O	O	O	O
	SP1-5	O	O	O	O
	SP1-5I	O	O	O	O
	SP3-8	A	A	A	A
	SP1-5X	O	O	O	O
	P1-5CT	O	O	O	O
	VC1-6	A	O	X	O
	VC1-6T	A	O	X	O
	SVC1-6	A	O	X	O
	SVC1-6H	A	O	X	O
	E3-10	A	A	A	A
	EN3-10	A	A	A	A
	EV3-10	O	X	O	O
	EV3-10T	O	X	O	O
	EC3-10	O	O	O	O
	EC3-10T	O	O	O	O
	E3-10H	A	A	A	A
	EC3-10H	O	O	O	O
	EV3-10H	O	X	O	O
	103-12	O	O	O	O
	CW2.0	A	A	A	A
	CW5.0	A	A	A	A
	108-17	O	O	O	O
	EV3-10X	O	X	O	O
	EC3-10X	O	O	O	O
VE3-10H	A	O	X	O	
C5-8N	O	O	O	O	
C5-8NT	O	O	O	O	
SP1-5T	O	O	O	O	
SP3-8T	A	A	A	A	
108-17T	O	O	O	O	
minisono L3-	O	X	O	X	
minisono C1-6	O	X	O	X	
TEE3-7	A	A	A	A	
Akcesoria	US-Guider	X	A	A	A

*) Antigermix, V-PRO: może wystąpić lekkie odbarwienie obudowy i kabla. Te zmiany nie mają wpływu na wydajność urządzenia.